




Belangrijke aanwijzingen

 ATTENTIE	<p>ATTENTIE</p> <p>Door het indrogen van vuilresten verslechterd de reiniging. → Spoel het instrument direct na het behandelen af, maximaal 10 min hierna moet begonnen worden met het reinigen.</p>
 ATTENTIE	<p>ATTENTIE</p> <p>Het dient aanbeveling om het personeel dat deze voorreiniging uitvoert hierin te onderwijzen, zodat de juiste uitvoering hiervan gegarandeerd is.</p>
 ATTENTIE	<p>ATTENTIE</p> <p>Infectiegevaar door niet steriele instrumenten → Draag tijdens de gehele reinigingsprocedure handschoenen.</p>
 ATTENTIE	<p>ATTENTIE</p> <p>De instrumenten niet in een bad met reinigingsmiddel leggen/onderdompelen.</p>
 WAARSCHUWING	<p>WAARSCHUWING</p> <p>Gevaar door niet of gedeeltelijk gedesinfecteerde instrumenten → MK-dent beveelt ALPRO®-WL aan voor desinfectie. Het gebruikte desinfectiemiddel moet aantoonbaar bacteriedodend, schimmeldodend en virusdodend zijn. Als het desinfectiemiddel de voorgeschreven eigenschappen niet vervult, dan moet aansluitend nog gesteriliseerd/thermodesinfecteerd worden.</p>



Toebehoren

- Reinigings middel **ALPRO® WL-clean**
- Desinfectiemiddel **ALPRO® WL-cid**
- Droogspray **ALPRO® WL-dry**
- **ALPRO®** Reinigingsadapter, volgens instrumenten type
- Reiniging's borstel


1 Voorbereiding na behandelingseinde

 <p>20 Sek.</p>	
<p>Spoel het instrument nog 20 seconden door met water en neem daarna de boor uit het instrument.</p>	<p>Haal het instrument van de motor of koppeling af.</p>


2 Voorreiniging

	 <p>1 Min.</p>
<p>Instrument op reinigingsadapter steken.</p>	<p>Instrument met behulp van reinigingsadapter 1 minuut van binnen en buiten met water spoelen.</p>

 ATTENTIE	<p>ATTENTIE</p> <p>Infectiegevaar door meermaals gebruikte reiniging's borstels → om kruisbesmetting te voorkomen reiniging's borstels maar voor 1 instrument gebruiken.</p>
--	--

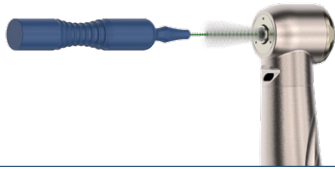

Binnenzijde van spatang met een draaiende beweging reinigen, gebruik hiervoor de meegeleverde reiniging's borstel.

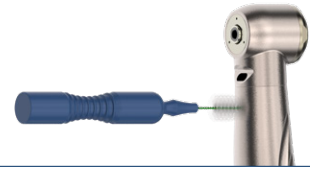

Met de meegeleverde reiniging's borstel ook eventuele verontreinigen aan de buitenzijde van instrument verwijderen.



ATTENTIE

Gevaar voor beschadigen van instrument door onvoorzichtige behandeling, beschadigen van de lichtgeleider.
→ reinig de lichtgeleider uiterst voorzichtig.



ATTENTIE

Na elke reiniging van de lichtgeleider een zicht controle uitvoeren, bij beschadiging aan de lichtgeleider het instrument niet meer in gebruik nemen, maar het instrument laten repareren door een gecertificeerde MK-dent reparateur.

3 Reiniging



Reinig het instrument met WL-clean, zo lang sprayen totdat het reinigingsmiddel zichtbaar aan de voorkant uit het instrument komt. De ALPRO® adapter hoeft hiervoor niet verwijderd te worden.



+2x 2Sek.

Hierna nog 2 maal 2 seconden sprayen, zodat het reinigingsmiddel zich overal in het instrument goed verspreid.



Hierna het instrument aan de buitenzijde afnemen met een doek met WL-clean.

4 Desinfectie en spoelen



Herhaal de voorgaande stap nu met WL-cid, en ook het afnemen van de buitenkant van het instrument.



+1 Min.

Spoel het instrument opnieuw gedurende één minuut met stromend water van binnenuit om de restanten van het desinfectiemiddel te verwijderen.



ADVIES

De inwerktijd van het WL-cid bedraagt 3 min.

5 Droging



Verwijder door het sprayen van WL-dry desinfectiemiddel resten uit het instrument, spray zo lang totdat er geen vochtigheid meer uit het instrument komt.

6 Onderhoud met MK-dent premium service olie LU1011

 ADVIES	ADVIES Voer De volgende stappen voor elke sterilisatie in deze volgorde uit.
 INFORMATIE	INFORMATIE MK-dent beveelt aan om het instrument na elk gebruik door te smeren met MK-dent LU1011 olie, LET OP na desinfectie en vóór sterilisatie.
 2 Sek.	 2 Sek.
Zet de meegeleverde olieadapter op de spuitbus en spray de spantang 2 seconden.	Schroef nu de benodigde olieadapter op de spuitbus steek het instrument op de adapter en spray het instrument 2 seconden door.
 15-20 Sek.	
Sluit het instrument aan op de behandelstoel en laat het instrument 15 tot 20 seconden lopen met alleen aandrijfvlucht, zodat de overtollige olie uit het instrument loopt.	

7 Sterilisatie in een dampsterilisator (autoklaaf) volgens EN1306/ISO17665-1

 ADVIES	ADVIES MK-dent adviseert na elke handmatige reiniging sterilisatie in een dampsterilisator.
 INFORMATIE	INFORMATIE De sterilisatie is met een Tuttnauer EHS3870 vacuüm autoklaaf klasse B bij 134°C 5 Minuten gevalideerd. De sterilisatie verpakking moet groot genoeg zijn, zodat deze niet onder spanning staat, en moet voldoen aan de geldende kwaliteit's en gebruik's normen zoals deze voorgeschreven zijn. De volgende sterilisatieprocedure moet worden gebruikt: - Autoklaaf met 3 trap's vacuüm (aanbevolen): min 5 minuten bij min 134°C Neem de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht.
 Elk instrument afzonderlijk in een sterilisatiezak verpakken.	
 ADVIES	ADVIES Houd er rekening mee dat het voorbereidingsproces van uw praktijk ook moet worden gevalideerd.